

SiliceEvolution

Cryolipolyse : Traitement des Excès Grassex

Indication idéale : des bourrelets localisés.

Il s'agit d'une méthode de destruction de la graisse par le froid.

Cette technique mise au point initialement par des chercheurs de Harvard après 12 ans de travaux, cible en toute sécurité sans intervention chirurgicale et sans douleur, les excès grassex localisés (ventre, poignées d'amour, bourrelets dorsaux, culotte de cheval, l'intérieur des cuisses).

La cryolipolyse ne se substitue pas à la liposuccion indiquée pour les surcharges grassexes importantes.

Elle permet de traiter aussi la zone du ventre autour de l'ombilic peu propice à la liposuccion.

Le SILICE EVOLUTION est l'appareil qui montre son efficacité en une **SEULE SEANCE**, la perte est d'environ 30% de la masse grassexue. Un total de 3 séances par zone peut être fait si la diminution n'est pas satisfaisante.

Quel est le mode d'action de la cryolipolyse :

La zone traitée est aspirée par l'applicateur puis refroidie. Ainsi refroidies les cellules grassexes (adipocytes) de la zone déterminée vont avoir une mort lente programmée (apoptose).

La cryolipolyse permet ainsi une réduction notable des bourrelets traités, les adipocytes morts lors de la séance étant progressivement éliminés par les voies naturelles. Un amincissement se produit sur la zone traitée.

La graisse étant plus sensible au froid, les tissus avoisinants (peau, muscles) ne sont pas lésés.

Comment se déroule une séance ?

Avant la séance :

Préalablement votre spécialiste aura visualisé la zone à traiter, déterminé les objectifs et remis un devis.

Des photos seront pratiquées pour visualiser les résultats avant-après.

Les meilleures indications sont les patients hommes ou femmes ayant un indice de masse corporelle proche de la normale, mais qui présentent des excès grassex localisés qui ne disparaissent pas malgré régime et exercice.

Pendant la séance :

Un film imbibe de gel est appliqué sur la peau puis l'applicateur mis en place sur la zone à traiter (choisi en fonction du volume et de la nature du bourrelet). Une aspiration se produit légèrement désagréable pendant 1 minute, puis le froid transmis par l'appareil diminue complètement les sensations. Le patient est ainsi en position allongée pendant 45min-1 heure.

A la fin de la séance :

L'applicateur est retiré de la zone traitée. La séance est alors terminée et le patient peut reprendre une activité normale. Dans les heures et les jours qui suivent peuvent se produire quelques hématomes et une sensation douloureuse d'engourdissement (hypoesthésie douloureuse) peu désagréable.

Ces effets secondaires sont toujours réversibles.

Après la séance quand peut-on voir le résultat ?

Dans les suites immédiates de la séance les résultats ne sont pas encore visibles. La fonte grassexue va s'effectuer en 4 à 6 semaines. **ELLE SERA PERSISTANTE ET DURABLE** (sous la condition de se maintenir à un poids identique). Les résultats définitifs sont constatés au bout de 3 mois.

Contre-indications : grossesse, allaitement, hypersensibilité au froid (syndrome de Raynaud, cryoglobulinémie), hernies abdominales et ombilicales (pour les traitements du ventre), plaies et cicatrices récentes.